



د کویډ-19 د انټیجن بېرني معایناتو د استعمال لارښوونې

Step 1: Prepare Material

1 گام: مواد چمتو کړئ

تاسو ممکن په معایناتي بسته کې د معایناتي موادو 1 سیټ یا د معایناتي موادو 2 سیټ ولرئ. مهرباني وکړئ د ترلاسه شوي ځانګړي سیټ پر اساس په سم ډول لاندې ګامونه تعقیب کړئ.

د معایناتي موادو 2 مجموعه: Test Set 2:

کڅوره خلاصه کړئ، په کڅوره کې د کویډ-19 ټیسټ کارټ را واخلي، هغه پیپ چې لا له وړاندې له استخراجي محلول څخه ډک شوی وي راوکاږئ. کله چې تاسو د معایناتو ترسره کولو ته چمتو شئ، د کویډ-19 د معایناتي کارټ څخه پاکټ خلاص کړئ.



1 COVID-19 Test Card in Pouch



1 Empty Tube and 1 Sealed Solution



1 Swab



1 COVID-19 Test Card in Pouch



1 Pre Filled Tube



1 Swab


د معایناتو لومړۍ برخه: Test Set 1:

بسته خلاصه کړئ، د کویډ-19 معایناتي کارټ له کڅورې څخه را واخلي، خالي پیپ، مهر شوی محلول، او د معایناتو خاشه را وباسئ. کله چې تاسو د معایناتو ترسره کولو ته چمتو شئ، د کویډ-19 د معایناتي کارټ څخه پاکټ خلاص کړئ.

Step 2: Collect Sample

2 گام: نمونه را ټوله کړئ

A. د معایناتو خاشه له دې کڅورې څخه لیرې کړئ، دا په یاد لرئ چې د معایناتو د خاشې سر ته لاس مه وړ وړئ. مهرباني وکړئ د معایناتي خاشې کڅوره درسره وساتئ چې وروسته مو په کارېږي.

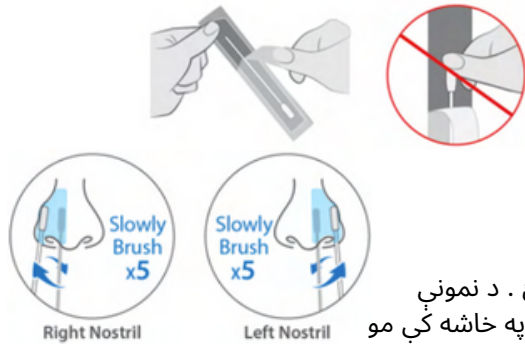

B. په نرمۍ سره د معایناتي خاشې ټوله جاذبه برخه (معمولا له 1/2 څخه تر 3/4 انچ پورې) خپلې پوزې ته دننه کړئ.

C. لږ تر لږه 5 ځلي یې د پوزې پر دیوال په کراره کراره په دایروي شکل سره وڅرخوئ. د نمونې راټولولو لپاره لږترلږه 15 ثانیې وخت ونیسئ او ځان په دې ډاډه کړئ چې د معایناتو په خاشه کې مو د پوزې اوبه راټولې شوې دي. د معایناتو له همدې خاشې څخه په استفاده د پوزې له بلې برخې څخه د نمونې راټولولو لپاره همدا کړنلاره تکرار کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې د پوزې دواړې سږمې د معایناتو په همدې یوه خاشه باندې برس کړئ.

Step 3: Process Sample



الخطوة الثالثة: باشر بالعينة

C. د پیپ دواړه اړخونه کنټرول کړئ تر څو د معایناتو له خاشې څخه د امکان تر حده ډېر مایع راووځي او بیا خاشه لیرې کړئ.

D. نارنجي لوی کیپ بیرته وپيچئ، د معایناتو خاشه بیرته کڅوره کې واچوئ. معایناتي خاشه او بسته په خوندي ډول تصفیه کړئ.

A. پیپ په عمودي ډول پر مېز کنټرول کړئ او د پیپ خلاصولو لپاره لوی نارنجي کیپ تاو کړئ.

B. د معایناتو خاشه پیپ ته دننه کړئ، د پیپ لاندنۍ برخه د معایناتي خاشې په واسطه وموښئ او لږترلږه 15 ځله یې سره وښوړئ.

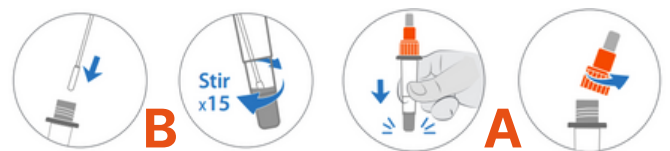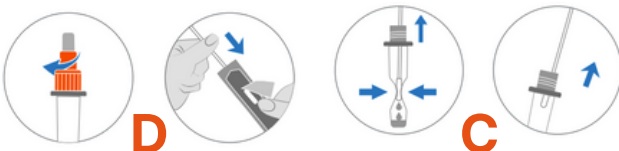




4 گام: نمونه اضافه کړئ

Step 4: Add Sample

د پيپ د کوچني سپين سرپوښ د خلاصولو لپاره هغه تاو کړئ. د نمونې 3 څاڅکي د کوويډ-19 معياناتي کارټ د نمونې څوکې ته اضافه کړئ. کوچنی سپين سرپوښ بېرته وتړئ.

6 گام: پایله وگورئ

Step 6: Read Results

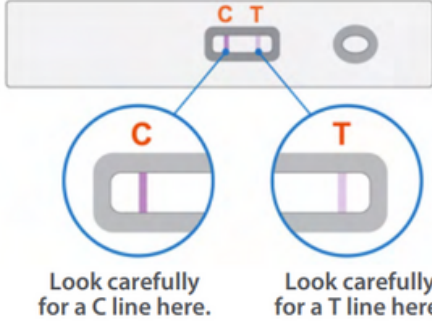

پایله باید د 30 دقیقو څخه وروسته ونه کتل شي (پایله په 2X غټ سائز کې و ښودل شي).

5 گام: 15 دقیقې انتظار وکړئ

Step 5: Wait 15 minutes

وروسته له دې چې د معياناتو لپاره نمونه د سيمپل څوکې ته ورسېږي، سملاسي په اپليکيشن کې د "Start Timer" تڼۍ په کلیک کولو سره وخت قيد کړئ. پایله به په 15 دقیقو کې چمتو شي.



Step 7: Test Result Explanation


7 گام: د معياناتو د پایله توضیحات

مثبت پایله:

Positive Result



په مثبت پایله کې باید پر C (روښانه ارغواني) کرښه او T باندې (توره ارغواني) دواړه کرښې وي. مثبت پایله په دې معنی ده چې د کوويډ-19 وایرس کشف شوی او یاد شخص د کوويډ-19 معيانات مثبت دي.

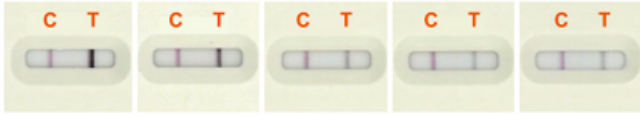

هغه کسان چې معيانات یې مثبت وي باید ځان جلا کړي او خپل ډاکټر یا روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکي څخه د پاملرنې او روغتيايي تعقيب غوښتنه وکړي ځکه کېدای شي د اضافه معياناتو او د عامې روغتيا د راپور ورکولو ته اړتيا پيدا شي.

Negative Result



منفي پایله:

د منفي پایله په صورت کې به یوازې پر C (روښانه ارغواني) کرښه وي.

منفي پایله په دې معنی ده چې د کوويډ-19 وایرس انټیجونه نه دي موندل شوي او داسې گومان دی چې دا شخص کوويډ-19 نه لري.

- مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې په منفي پایله کې د کوويډ-19 احتمال نه رډېري
- د معياناتو د منفي پایله په صورت کې: ټول ټولنيز واټن تعقيب کړئ، سپارښتنې عملي کړئ او محافظتي تدابیر ونیسئ. که په وایرس د ککړېدو شک دوام ومومي او/ یا ستاسو لومړني معيانات منفي وي، د 1-2 ورځو وروسته بیا معيانات وکړئ او د خپل روغتيايي پاملرنې د چمتو کوونکي یا د کوويډ-19 د سیمه ایز مرکز سره مشوره وکړئ.

Step 8: Dispose of Test Kit

8 گام: د معياناتو کيټ لیرې کړئ



See more at AnchoragePLNs.org

د معياناتو تر بشپړیدو وروسته، د کيټ ټول مواد د څڼو په سطلي واچوئ