



# Експрес-тест на антиген COVID-19 Інструкція із застосування

## Крок 1: Підготуйте матеріали


## Step 1: Prepare Material

У пакеті може бути тестовий набір 1 або тестовий набір 2. Будь ласка, виконайте належні дії, в залежності від конкретного отриманого набору.

### ТЕСТОВИЙ НАБІР 1:

#### Test Set 1:

відкрийте упаковку, дістаньте тест-касету на COVID-19 в мішечку, пробірку, попередньо заповнену екстракційним розчином, і тампон. Коли ви будете готові перейти до тестування, відкрийте пакет із фольги з тест-касетою на Covid-19.

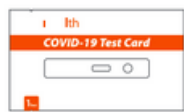

1 COVID-19 Test Card in Pouch



1 Empty Tube and 1 Sealed Solution



1 Swab

### ТЕСТОВИЙ НАБІР 2:

#### Test Set 2:

Відкрийте упаковку, дістаньте тест-касету на COVID-19 в мішечку, порожню пробірку, запечатаний розчин і тампон. Коли ви будете готові перейти до тестування, відкрийте пакет із фольги з тест-касетою на Covid-19.



1 COVID-19 Test Card in Pouch



1 Pre Filled Tube



1 Swab

## Крок 2: Зберіть зразок

## Step 2: Collect Sample

A. Витягніть тампон з упаковки, дотримуючись правил обережності, щоб не торкнутися кінчика тампона. Будь ласка, збережіть упаковку від тампона для подальшого використання.

B. Обережно вставте весь абсорбуючий кінчик тампона (зазвичай від 1/2 до 3/4 дюйма) в ніздрю.

C. Впевнено й повільно круговими рухами проведіть по стінці носа з внутрішнього боку ніздрів не менше ніж 5 разів. Збирайте зразок протягом щонайменше 15 секунд й обов'язково зберіть будь-яку рідину з носа на тампон. Використовуючи той же тампон, повторіть ту ж процедуру взяття зразка для іншої ніздрі. Обов'язково використовуйте для ОБОХ ніздрів ОДИН І ТОЙ САМИЙ ТАМПОН.



## Крок 3: Обробіть зразок


## Step 3: Process Sample

A. Злегка постукайте пробіркою по столу, тримаючи її вертикально, й поверніть велику помаранчеву кришку, щоб відкрити пробірку.

B. Вставте тампон у пробірку, торкніться дна пробірки кінчиком тампона й перемішайте не менше 15 разів.

C. Стисніть пробірку з боків, щоб зцідити якомога більше рідини з тампона, а потім видаліть тампон.

D. Закрийте велику помаранчеву кришку, покладіть тампон назад в упаковку. Утилізуйте тампон і упаковку безпечним чином.

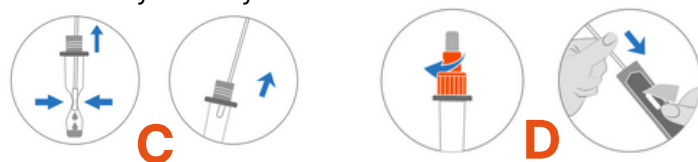

## Крок 4: Додайте зразок

### Step 4: Add Sample

Поверніть маленький білий ковпачок, щоб відкрити пробірку. Додайте 3 краплі зразка в отвір для зразка тестової касети на COVID-19. Закрутіть маленький білий ковпачок.



## Крок 5: Зачекайте 15 хвилин

### Step 5: Wait 15 minutes


Відразу після додавання зразка у відповідний отвір почніть відлік часу, натиснувши кнопку "Запустити таймер" у додатку. Результат буде готовий через 15 хвилин.



## Крок 6: Зчитайте результат

### Step 6: Read Results

Результати не повинні бути готові через 30 хвилин (результат показаний при 2-кратному збільшенні).

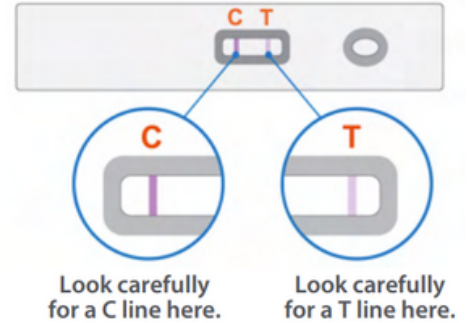


## Крок 7: Пояснення результатів тесту

### Позитивний результат:

При позитивному результаті повинна бути видна як смужка C (СВІТЛО-ФІОЛЕТОВА), так і смужка T (ТЕМНО-ФІОЛЕТОВА). Позитивний результат означає, що були виявлені вірусні антигени COVID-19 і людина заражена COVID-19. Люди з позитивним результатом тесту повинні самоізолюватися і звернутися за подальшою допомогою до свого лікаря або постачальника медичних послуг, оскільки їм може знадобитися додаткове тестування і медичні довідки.

### Step 7: Test Result Explanation

#### Positive Result

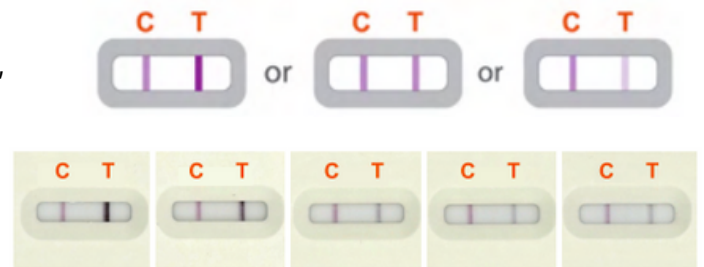

### Негативний результат:

Негативний результат покаже ТІЛЬКИ СМУЖКУ C (СВІТЛО-ФІОЛЕТОВУ).

Негативний результат означає, що вірусні антигени COVID-19 не були виявлені і людина не заражена COVID-19.

#### Negative Result



- Будь ласка, зверніть увагу, що негативні результати не виключають наявності COVID-19
- У разі негативного результату тесту: Продовжуйте дотримуватися всіх рекомендацій щодо соціального дистанціювання і вживати захисних заходів. Якщо підозри на інфекцію зберігаються та/або ваш перший тест негативний, повторіть тест через 1-2 дні і проконсультуйтеся з вашим лікарем або місцевим центром з боротьби з COVID-19.

## Крок 8: Утилізуйте тестовий набір

Після завершення тесту утилізуйте компоненти набору у смітник

### Step 8: Dispose of Test Kit

See more at  
[AnchoragePLNs.org](https://AnchoragePLNs.org)

